




## Научно-производственное предприятие "Монитор"

- ОСНОВАНО 14 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА;
- ПРОИЗВОДИТ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ В ГОД, ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЯ НОМЕНКЛАТУРУ;
- НЕОДНОКРАТНЫЙ ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ, ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ЗДОРОВЬЕ» И ПО ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
- ЭКСПОРТ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 25% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ.

**ТРИ В ОДНОМ**  
**СТАЦИОНАРНЫЙ**  
(С ВОЗМОЖНОСТЬЮ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК)  
**ПЕРЕНОСНОЙ**  
(ВЕС 1,2 КГ)  
**МОБИЛЬНЫЙ**  
(ВОЗМОЖНОСТЬ ПИТАНИЯ ОТ  
БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ  
И АККУМУЛЯТОРОВ)

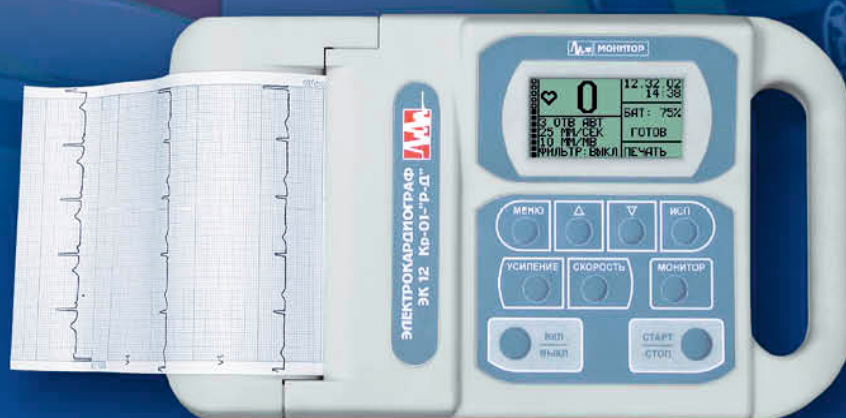

# ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ

## ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ С ГРАФИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ 63 ММ ПО ДИАГОНАЛИ

СПОСОБЕН ОДНОВРЕМЕННО РЕГИСТРИРОВАТЬ ТРИ, ШЕСТЬ ОТВЕДЕНИЙ ЭКГ ВДОЛЬ ЛИСТА БУМАГИ ИЛИ ДВЕНАДЦАТЬ ОТВЕДЕНИЙ ПОПЕРЕК ЛИСТА, А ТАКЖЕ РАБОТАТЬ В МОНИТОРНОМ РЕЖИМЕ И РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АРИТМИЙ

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- ОТДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, КАРДИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ;
- АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ;
- ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА.



**МОНИТОР**

...ваш эксперт в медицинской диагностике!

### ОСОБЕННОСТИ:

- ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений и трех отведений ЭКГ по Нэбу; 10 мм/мВ 50 мм/с 0,05-150 Гц
- наличие графического монохромного LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ;
- автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу;
- наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ;
- возможность снятия ЭКГ с любым количеством грудных отведений;
- возможность быстрого переключения основных режимов работы;
- регистрация RR-граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца;
- регистрация ЭКГ в режиме проб позволяет наглядно сравнивать ЭКГ до и после проведения проб;
- возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб;
- наличие памяти ЭКГ с дальнейшей возможностью ее вывода на печать.
- возможность снятия ЭКГ с детей (опция).

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- ручной по 3 или 6 отведений на выбор;
- автоматический по 3 отведения;
- автоматический по 3 отведения плюс отведение для анализа аритмий;
- автоматический по 6 отведений;
- автоматический по 12 отведений поперек листа;
- мониторный режим - возможность просмотра ЭКГ на графическом экране;
- режим аритмии - автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмии или экстрасистол у пациента;
- режим RR-граммы - регистрация RR-граммы в течение заданного времени;
- режим проб - многократная регистрация ЭКГ с заданным интервалом в течение заданного времени;
- режим печати копии - возможность печати копии последней ЭКГ, снятой в автоматическом режиме
- режим «Анализ ЭКГ»

Основные параметры режима съема электрокардиограммы: режим, чувствительность, скорость, включение антитреморного и антидрейфового фильтров, ЧСС и параметры ЭКГ регистрируются рядом с ЭКГ;

На дисплее прибора отображаются по выбору параметры режима съема, дата, время регистрации, параметры фильтров или меню или одно отведение ЭКГ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Ширина термобумаги** – 110 мм

**Размер экрана** – 55x30 мм;

**Наличие антитреморного, режекторного и антидрейфовых фильтров**

**Контроль обрыва электродов**

**Питание электрокардиографа осуществляется от:**

- сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением от 198 до 242 В;
- бортовой сети автомобиля скорой медицинской помощи напряжением от 10 до 18 В;
- внутреннего источника питания – аккумуляторной батареи 7,2 В (от 6 до 8 В)

**Мощность, потребляемая ЭК,** не превышает 10Вт;

**Электробезопасность** – класс II, тип CF

**Возможность вывода информации на компьютер с использованием программы архивации ЭКГ (опция);**

**Габариты** 260x154x67 мм;

**Масса** не более 1,2 кг.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Блок электрокардиографический со встроенным термопринтером и аккумулятором, кабель электродный, сетевой адаптер, комплект ЭКГ электродов, комплект бумаги, гель электродный, сумка, руководство по эксплуатации.

*НПП «Монитор», 344068, Ростов-на-Дону,*

*ул. Краснокурсаитская, 104 А.*

*Тел./Факс: (863) 231-04-01, 243-61-11, 243-63-77*

*Http://www.monitor-ltd.ru, npp.монитор.pф E-mail:mon@monitor-ltd.ru*

**Регистрационное удостоверение № 29/02061202/5192-03**